



**BILANCIA PESA NEONATI MECCANICA A STADERA
MOD. SUPERBABY**



 **Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento**

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI	2
2. SICUREZZA	3
3. USO PREVISTO	3
4. SPECIFICHE TECNICHE	4
5. INSTALLAZIONE	4
6. ISTRUZIONI PER L'USO	5
7. MONTAGGIO DELLO STATIMETRO	6
8. PROBLEMI E SOLUZIONI	7
9. MANUTENZIONE E ASSISTENZA	7
10. ETICHETTE IDENTIFICATIVE	7
11. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO	8
12. GARANZIA	8

Scegliendo la pesaneonati professionale meccanica **WUNDER** mod. **SUPERBABY** avete acquistato un apparecchio di alta precisione e qualità. Da oltre 40 anni **WUNDER** mette la propria esperienza al servizio della salute. La pesaneonati **SUPERBABY** è tarata in conformità alla classe di precisione III (secondo le norme 2017/745 e 90/384 CEE). Lo strumento è progettato per garantire una pesatura sicura e pratica dei neonati, grazie ad un sistema di pesatura con leve in alluminio e lettura del peso tramite asta serigrafata ad equilibrio non automatico.

1. DISPOSIZIONI GENERALI



Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D'USO E LA MANUTENZIONE.

WUNDER si riserva il diritto di modificare le immagini all'interno del seguente manuale, purchè siano modifiche puramente estetiche e non incidano sulla sicurezza e le performance dello strumento, senza impegnarsi a comunicare gli aggiornamenti tempestivamente.

Il Servizio Assistenza Clienti è a disposizione per ulteriori informazioni sull'uso, sulla manutenzione e sull'assistenza di questo prodotto.

Convenzioni:

In questo manuale sono stati adottati i seguenti simboli:

	DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745
	STRUMENTO IDONEO PER USO LEGALE, IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/31/UE E ALLA NORMA EUROPEA EN45501
	DISPOSITIVO MEDICO
	IDENTIFICATIVO UNICO DEL DISPOSITIVO
	STRUMENTO IN CONFORMITÀ CON LA DIRETTIVA METROLOGICA NAWI CLASSE DI PRECISIONE III 90/384 - 2014/31/UE E LO STANDARD EUROPEO EN45501
	AVVERTENZA! POSIZIONATO PRIMA DI DETERMINATE PROCEDURE. LA SUA INOSSERVANZA PUÒ PROCURARE DANNI ALL'OPERATORE, AL PAZIENTE E AL PRODOTTO.
	LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LO STRUMENTO
	FABBRICANTE: WUNDER SA.BI. SRL – VIA VECCHIA PER MONZA, 20 – TREZZO S/ADDA (MI), ITALY

2. SICUREZZA



ATTENZIONE!

Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d'uso e di manutenzione dello strumento.

La casa costruttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti, compresa la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall'uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale.

- Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell'addestramento del personale
- Non sovraccaricare lo strumento oltre il valore di portata massima
- Non applicare i carichi in modo brusco.
- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per premere i tasti
- Non tentare di aprire lo strumento.
- Non rimuovere i sigilli di conformità presenti sullo strumento.
- Non immergere lo strumento in acqua o altri liquidi
- Fate eseguire regolarmente le operazioni di manutenzione e le verifiche metriche successive

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

3. USO PREVISTO

Tale dispositivo è destinato ad essere utilizzato per pesare neonati.

Limiti d'uso: tale dispositivo medico può essere utilizzato solamente come descritto nel presente manuale.

Vita utile del prodotto: 5 anni


4. SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	SUPER BABY
Fabbricante	Wunder Sa.bi. srl Trezzo S/Adda Milano Italy
Approvazione OIML	Classe III
Portata e divisione	20kg x 10g
Unità di misura	kg
Dimensioni	W570 x D340 x H185 mm con piatto montato;
Peso	Netto: 6.5 kg ; 7 kg Lordo (imballo)


5. INSTALLAZIONE

Dopo avere tolto lo strumento dall'imballo, verificare l'integrità e la presenza di tutti i componenti.
Lo strumento deve essere collocato su una superficie piana e stabile e tutti i piedini devono essere in contatto con il piano di appoggio.

Nella scatola sono inclusi:

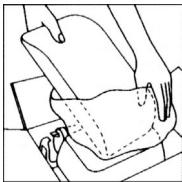

- Corpo della bilancia in metallo verniciato con asta ad equilibrio in alluminio anodizzato, super leggera,
- Piatto per neonati in metallo verniciato,
- 2 viti M5 x 18 per fissaggio piatto neonati,
- Manuale di utilizzo e cartiglio

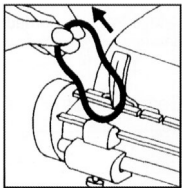


ATTENZIONE!



Non gettare le protezioni rimosse.
Potrebbero essere utili per un successivo trasporto dello strumento.

6. ISTRUZIONI PER L'USO


Lo strumento deve essere collocato su una superficie piana e stabile e tutti i piedini devono essere in contatto con il piano di appoggio.

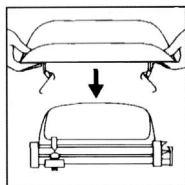

Lo strumento deve essere collocato su una superficie piana e stabile e tutti i piedini devono essere in contatto con il piano di appoggio. Posizionare il piano di pesatura negli appositi incavi e avvitare con le due viti in dotazione.






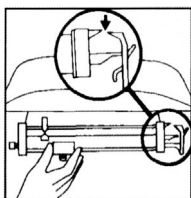
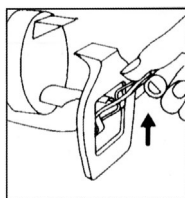


Controllare e assicurarsi che il blocco di sicurezza dell'asta in alluminio sia sbloccato alzando la leva di bloccaggio (vedi figura a fianco).

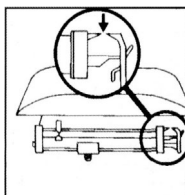


Lo strumento si presenta già pronto per essere utilizzato.


Prima di posizionare il neonato da misurare sul piano di pesatura verificare che l'asta sia in movimento basculante e che i due indici del peso siano allineati (come da figura a fianco). Posizionare il neonato da misurare sul piano di pesatura. Spostare i pesi a romano dei "kg" e dei "g" fino a che i due indici del peso raggiungano l'allineamento e leggere il peso indicato dall'asta serigrafata.

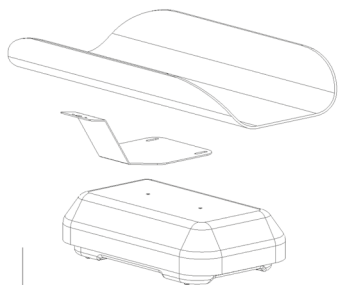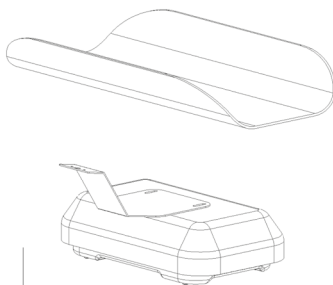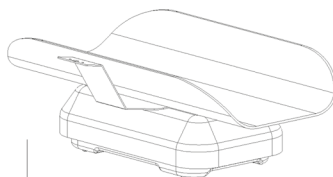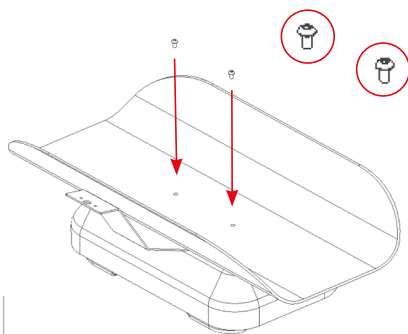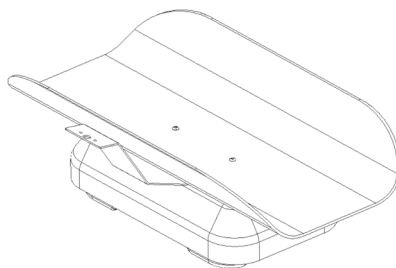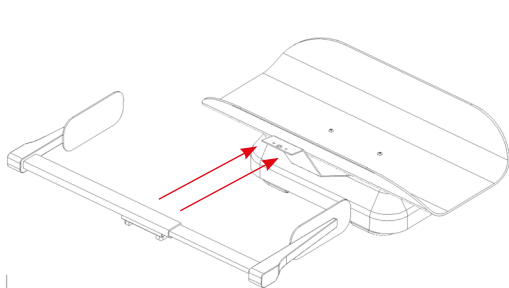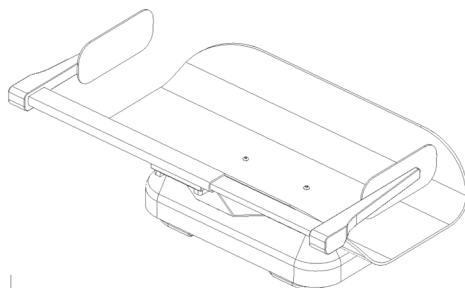7. MONTAGGIO DELLO STATIMETRO**1****2** Avvitare la staffa alla bilancia**3****4** Avvitare il piatto con le 2 viti in dotazione**5****6** Avvitare lo statimetro alla staffa**7** Bilancia con statimetro montato

8. PROBLEMI E SOLUZIONI

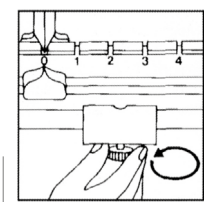

Nel caso in cui un possibile trasporto o utilizzo scorretto della strumentazione abbia compromesso l'allineamento degli indici, agire sul peso di calibrazione nero svitando la vite di fissaggio e muovendolo leggermente a seconda dell'allineamento degli indici.

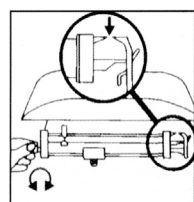

In seguito è possibile anche agire sulla vite posizionata a sinistra dell'asta di pesatura d'equilibrio muovendola leggermente per ottenere l'allineamento degli indici di peso.

9. MANUTENZIONE E ASSISTENZA



ATTENZIONE!

Si raccomanda di mantenere sotto controllo lo strumento in dotazione con una corretta manutenzione periodica, con periodicità da definire a cura dell'utilizzatore.

Raccomandiamo di far eseguire tale controllo da personale qualificato per effettuare l'intervento. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti che è a vostra disposizione.

Per una migliore e più lunga durata del prodotto è bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale. La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive. Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche. In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore o a un centro autorizzato contattando **service2@wunder.it** o **sales@wunder.it**.

10. TARGHETTE IDENTIFICATIVE



ATTENZIONE!

Nella targhetta metrologica applicata è indicato l'anno di fabbricazione (M YY) es. M 24 = 2024, M 25 =2025...e così via.

REF SUPERBABY Max = 20 kg e = 10 g Min = 200 g +5 °C / +35 °C	Wunder Sa.Bi. s.r.l. Headquarters: Via Vecchia per Monza, 20 20056 - Trezzo sull'Adda (MI) - Italy Registered office: Via Monte Grappa, 7 24121 - Bergamo (BG) - Italy CE M YY 0474 T12037 rev 0 SN 0000 2025-01-17 (01)08052570460045 (11)250117 (21)C24010000 IC: 00290 SN C24010000
IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2017/745 CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2017/745 CE 0425	

11. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO

Accantonamento

In caso di accantonamento per un lungo periodo è necessario provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere

Rottamazione

Quando si decide di non utilizzare più questo articolo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti che possono essere causa di fonti di pericolo

12. GARANZIA

Il presente certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza della garanzia.

Esso dovrà essere presentato insieme alla fattura, ricevuta fiscale, o bolla di accompagnamento che riporti il nominativo del rivenditore e la data di vendita ogni volta che si renda necessario un intervento tecnico. Diversamente l'utente perderà ogni diritto di garanzia. La garanzia ha inizio dalla data di acquisto e ha validità per il periodo previsto dal catalogo/listino vigente. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita entro i termini stabiliti, delle parti componenti l'apparecchio che a insindacabile giudizio della casa costruttrice risultassero difettosi all'origine; sarà quindi facoltà della Wunder, riparare o sostituire l'articolo.

La garanzia non copre:

- danni da trasporto, danni da cadute, danni causati da negligenza e manomissione
- danni per incapacità d'uso dell'apparecchio e uso improprio dello stesso
- danni causati dall'insufficienza o inadeguatezza dell'impianto elettrico o alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura
- danni dovuti a errata installazione dell'apparecchio e riparazioni effettuate da personale non autorizzato
- Interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti
- Manutenzione ordinaria e ciò che può essere considerato normale deperimento per uso

Il servizio di intervento può essere inoltre rifiutato quando l'apparecchiatura sia stata modificata o trasformata in qualsiasi modo. Nel caso di intervento a domicilio l'utente è tenuto a corrispondere il diritto fisso d'uscita, qualora invece l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri del Servizio di Assistenza autorizzati Wunder, le spese ed i rischi relativi al trasporto saranno a carico dell'utente.

Wunder non risponde altresì di eventuali danni di qualsiasi natura, che possano derivare direttamente o indirettamente a persone, animali o cose conseguenti all'inosservanza di tutte le istruzioni indicate in questo manuale o comunque derivanti da un uso improprio.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.