


GINRAM®

PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA
Gynaecological disposable, sterile devices

AMNIORAM

Ago per amniocentesi transaddominale
Transabdominal amniocentesis needle

COD. 770212 – 770228 – 770222 – 770224 – 770201 – 770226 –
770227 770223 770202 770229 - 770232 - 770233

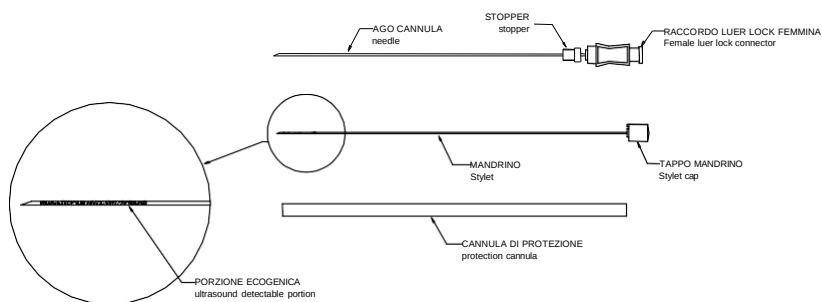

NL

Gebruiksaanwijzingen

Haal de naald uit de verpakking

Controleer of de spil gemakkelijk naar buiten geschoven kan worden. Plaats de spil opnieuw alvorens de operatie te beginnen, door hem aan de naald te haken. De twee tekens op de plastic handgrepen dienen samen te vallen.

Steek de naald naar binnen op een loodrechte as om de (te voren geïdentificeerde) lijn van het ultrageluid te volgen, totdat u een vruchtwaterreservoir bereikt.

Verwijder de spil en bevestig aan de naald een spuit met de gewenste inhoud (gewoonlijk 20 cc).

Zuig amnionvloeistof aan door langzaam een matige, negatieve druk uit te oefenen, totdat de gewenste hoeveelheid vloeistof is afgetapt.

Verwijder de spuit, breng de spil weer op de naald aan en verwijder hem.

Breng de amnionvloeistof over in een droge, steriele reageerbuis en bewaar hem op een temperatuur van 37°.

Waarschuwingen: vergewist u zich ervan dat de spil perfect en volledig in de naald is aangebracht. Bewaren bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Gebruiken onder strikt medisch toezicht. Onmiddellijk na het aanbreken van de verpakking gebruiken.

Het kan mogelijk sporen van nikkel bevatten.

LOT NUMERO DI LOTTO	REF CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	 FABBRICANTE	 DATA DI FABBRICAZIONE	 MONOUSO

LOT BATCH CODE	REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE