


**GINRAM®**

**PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA**  
Gynaecological disposable, sterile devices

**AMNIORAM**

***Ago per amniocentesi transaddominale***  
***Transabdominal amniocentesis needle***

**COD.770212 – 770228 – 770222 – 770224 – 770201 – 770226 –  
770227 – 770223 – 770202 – 770229 – 770232 – 770233**

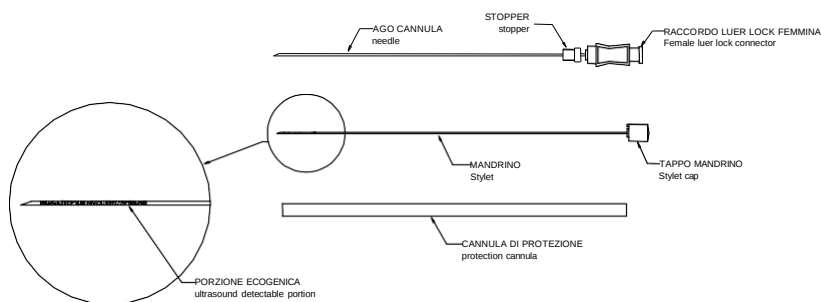

**D**

**Gebrauchsanweisung**

Punktionskanüle aus der Packung nehmen.

Vor dem Beginn der Untersuchung ist es nötig, sich sicherzustellen, daß die ankuppelnde Kerbe des Verschluß und der Sitz des Anschluß perfekt zueinander passen. Die Sperre auf die Kanüle am erforderlichen Stand positionieren. Das Verschluß nehmen, und die Sperre halten, damit sie nicht entweicht. Die Kanüle lotrecht einführen, um der (zuvor bestimmten) Ultraschallstrecke zu folgen, bis eine Amnion-Cisterna erreicht ist.

Mandrin entfernen und eine Spitze der gewünschten Größe (in der Regel 20 ccm) an der Kanüle anschließen.

Das Fruchtwasser unter langsamer Erzeugung eines mäßigen Unterdrucks absaugen, bis die gewünschte Flüssigkeitsmenge entnommen wurde.

Spitze abnehmen, Mandrin wieder in die Kanüle stecken und alles herausziehen.

Das Fruchtwasser in ein trockenes und steriles Reagenzglas füllen und bei einer Temperatur von 37°C aufbewahren.

**Hinweis:** Vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung lesen. Nicht wiederverwenden – Nur verwenden wenn die Verpackung unversehrt ist. Bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C lagern. Unmittelbar nach dem Öffnen des Beutels verwenden. Nach dem Gebrauch laut geltender Vorschriften vernichten. Die Vorrichtung darf nur von ärztlichen Fachkräften verwendet werden. **Es kann Spuren von Nickel enthalten.**

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOT</b> NUMERO DI LOTTO                                                                                                         | <b>REF</b> CODICE PRODOTTO                                                                                                       |  LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE |  LATEX FREE             | <b>STERILE EO</b> STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE                                       |
|  DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO |  LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO |  FABBRICANTE                        |  DATA DI FABBRICAZIONE |  MONOUSO |

|                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOT</b> BATCH CODE                                                                              | <b>REF</b> REFERENCE NUMBER                                                                                      |  ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE |  LATEX FREE            | <b>STERILE EO</b> STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE                                                     |
|  USE BY MM/YYYY |  CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE |  MANUFACTURER                        |  DATE OF MANUFACTURE |  DO NOT REUSE |